

ACEWAND™

La Lipoplastía RF más segura

© 2010-2018 ACEWAND™. All rights reserved

RF = Radio-Frecuencia

150 kHz - 4MHz

El procedimiento
ACEWAND™ consiste en
la aplicación transoperatoria
de energía de RF filtrada y
acondicionada para producir
retracción cutánea
postoperatoria.

El efecto de retracción cutánea comienza inmediatamente después de la aplicación de RF. El efecto máximo se logra a los 6 meses del postoperatorio.

El procedimiento
ACEWAND™ está
indicado en todos los casos
de liposucción primaria para
minimizar la flaccidez
postoperatoria.

En la mayoría de los casos de mini-abdominoplastía, se puede ofrecer un procedimiento **ACEWAND™** como una alternativa menos agresiva.

CONTRAINDICACIONES:

- 1) Enfermedad por “modelantes”
- 2) Liposucción secundaria
- 3) Fibrosis significativa ú otra patología en el área operatoria propuesta

ACEWAND™

Antena de Radio-Frecuencia Monopolar



**Antena de Radio-Frecuencia Monopolar
con circuito acondicionador de RF de
estado sólido interconstruido**



La energía RF filtrada y
acondicionada se libera
exclusivamente por la punta

Nunca use el
ACEWAND™ para el
tunelizado subcutáneo como
si fuera una cánula de metal
porque se daña.

ACEWAND™ es un
aparato delicado de alta
tecnología

Técnica ACEWAND™

1) Marcaje Preoperatorio

2) Efectúe la liposucción completa con técnica tumescente, tunelizando con cánulas metálicas

3) Finalmente, utilice la Antena de Radio-Frecuencia Monopolar (ACEWAND™) para retraer la piel


1) Marcaje preoperatorio:
dibuje túneles de 2 cm de
ancho siguiendo un patrón en
abánico





2) Efectúe la liposucción completa con técnica tumescente

Nunca use el
ACEWAND™ para el
tunelizado subcutáneo como
si fuera una cánula de metal
porque se daña.

ACEWAND™ es un
aparato delicado de alta
tecnología

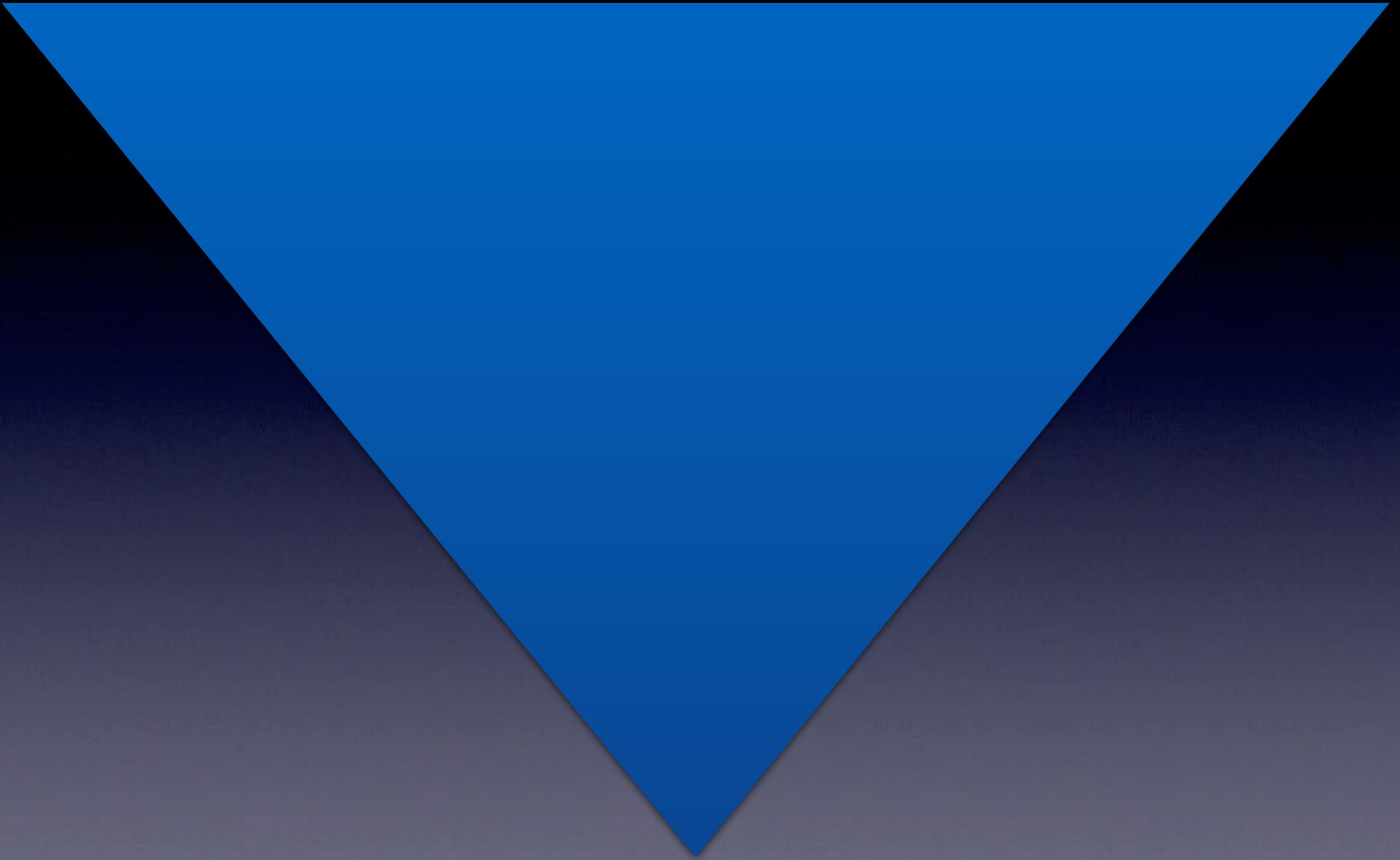

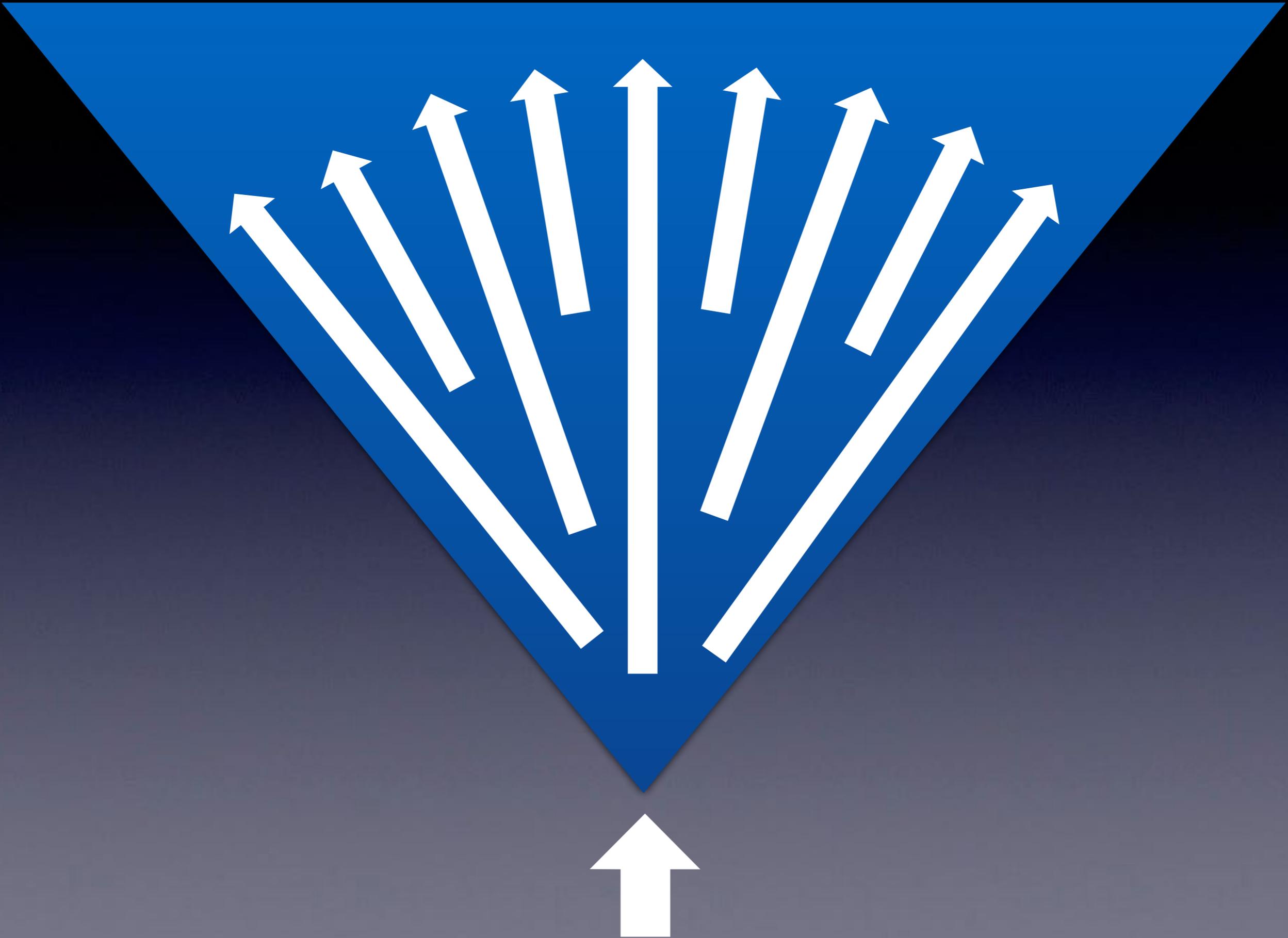

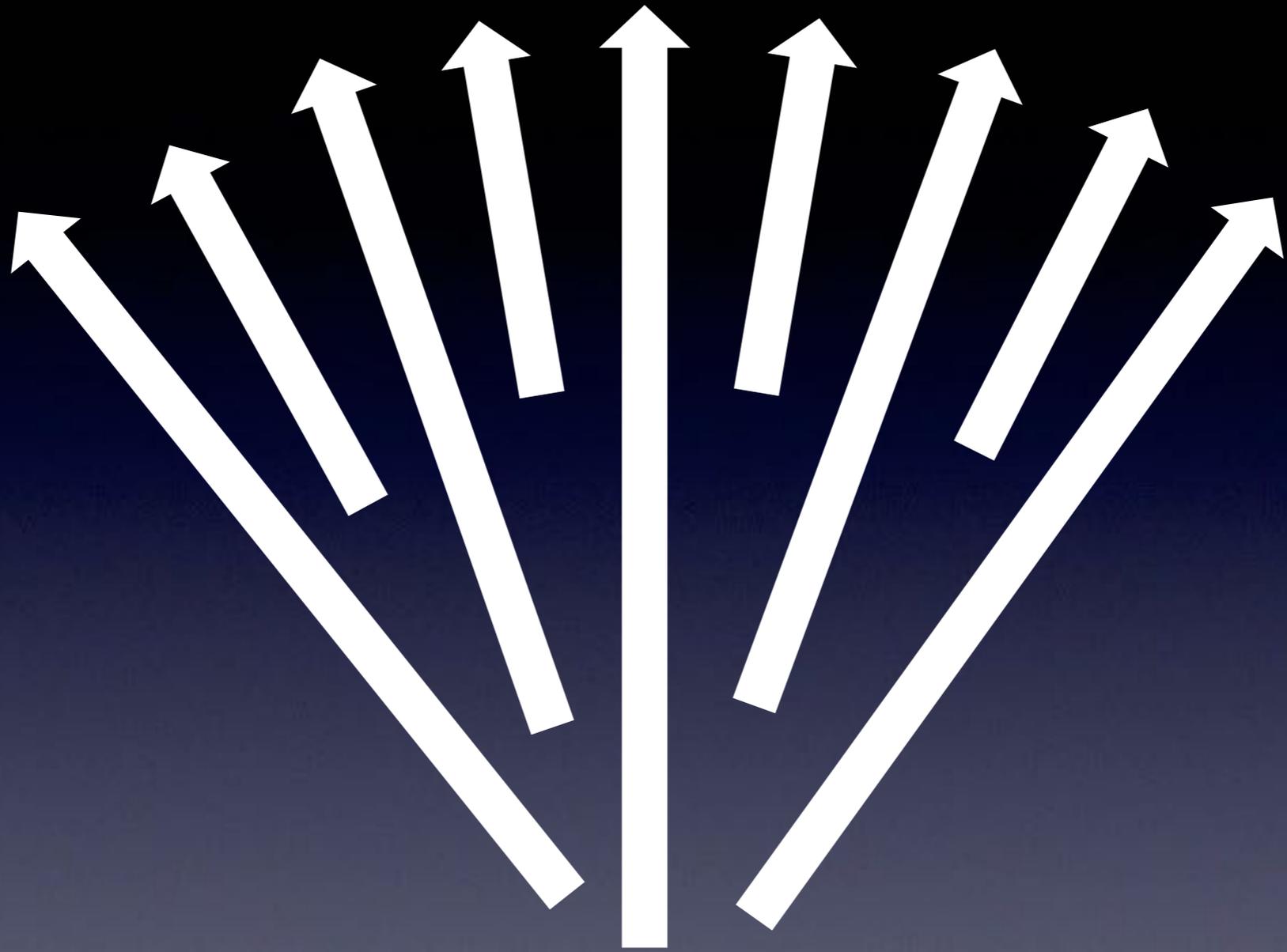



Ya que la liposucción
esté totalmente
terminada, proceder
con la aplicación de
energía de RF

3) Utilice la Antena de Radio-
Frecuencia Monopolar
(ACEWAND™)

Conexiones




Ponga el
Electrocauterio
en modo
Coagulación, a
30 Watts de
salida



Asegúrese de
que el
electrodo de
retorno este
bien fijo al
paciente



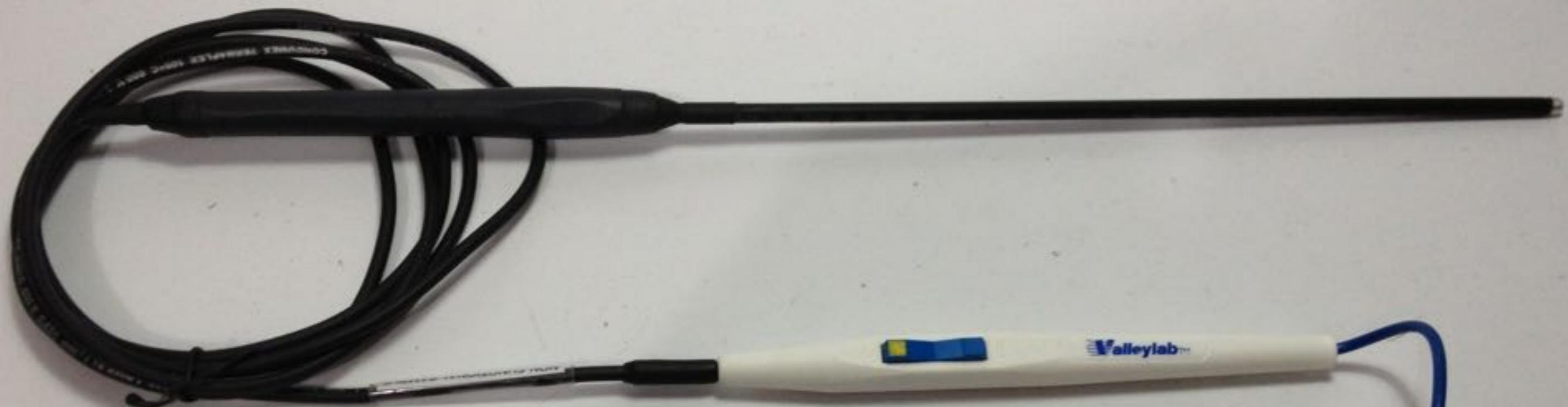



Aplicación de energía de Radio-frecuencia

1) Inserte

ACEWAND™ por la
misma incisión de la
liposucción






2) Presione el switch “COAG” del mango ó preferiblemente el switch de pedal del electrocauterio y lentamente vaya extrayendo ACEWAND™ a una velocidad de 2 cm por segundo






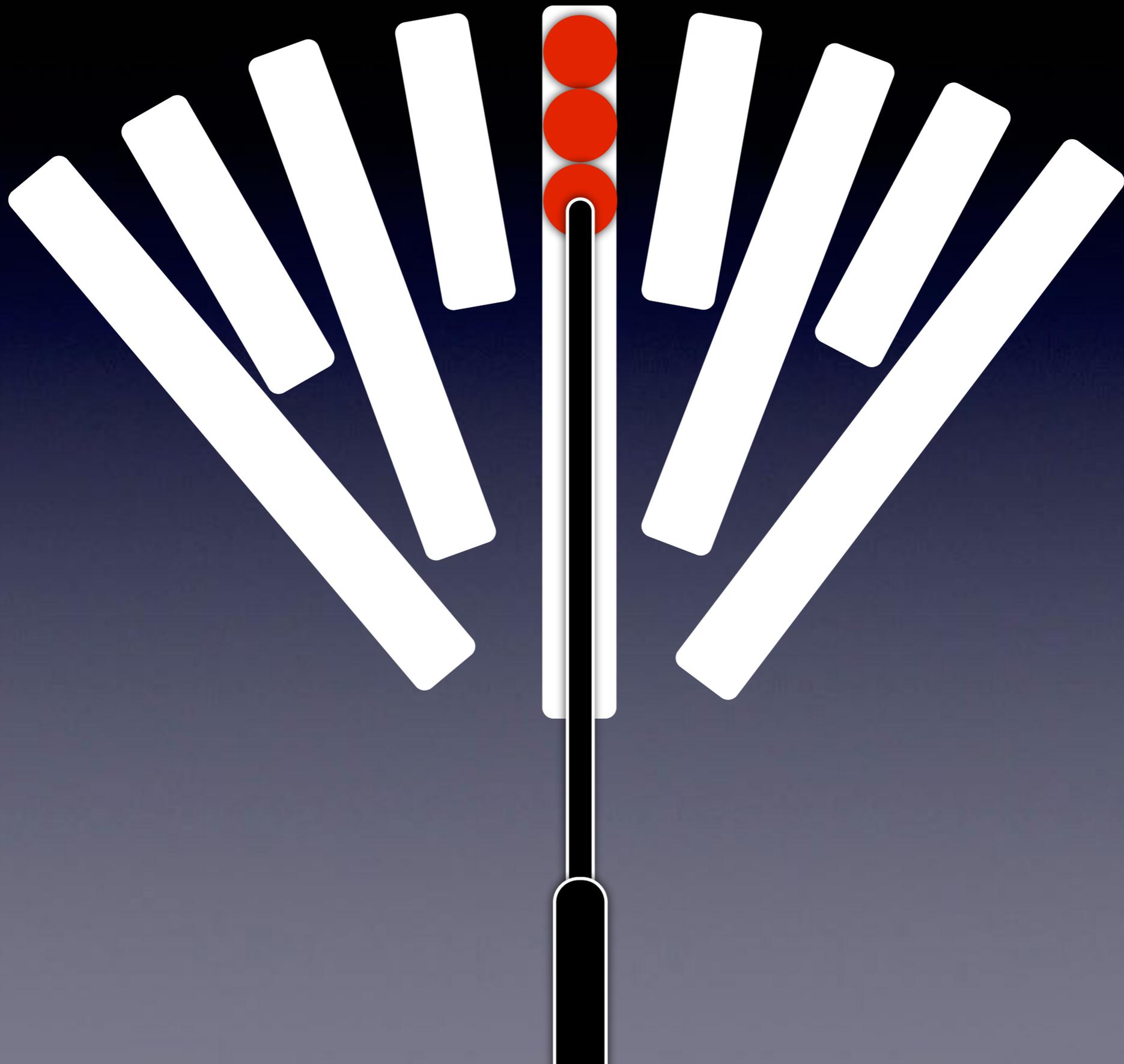






3) Deje de presionar el switch del electrocauterio antes de retirar completamente ACEWAND™ por la incisión de liposucción

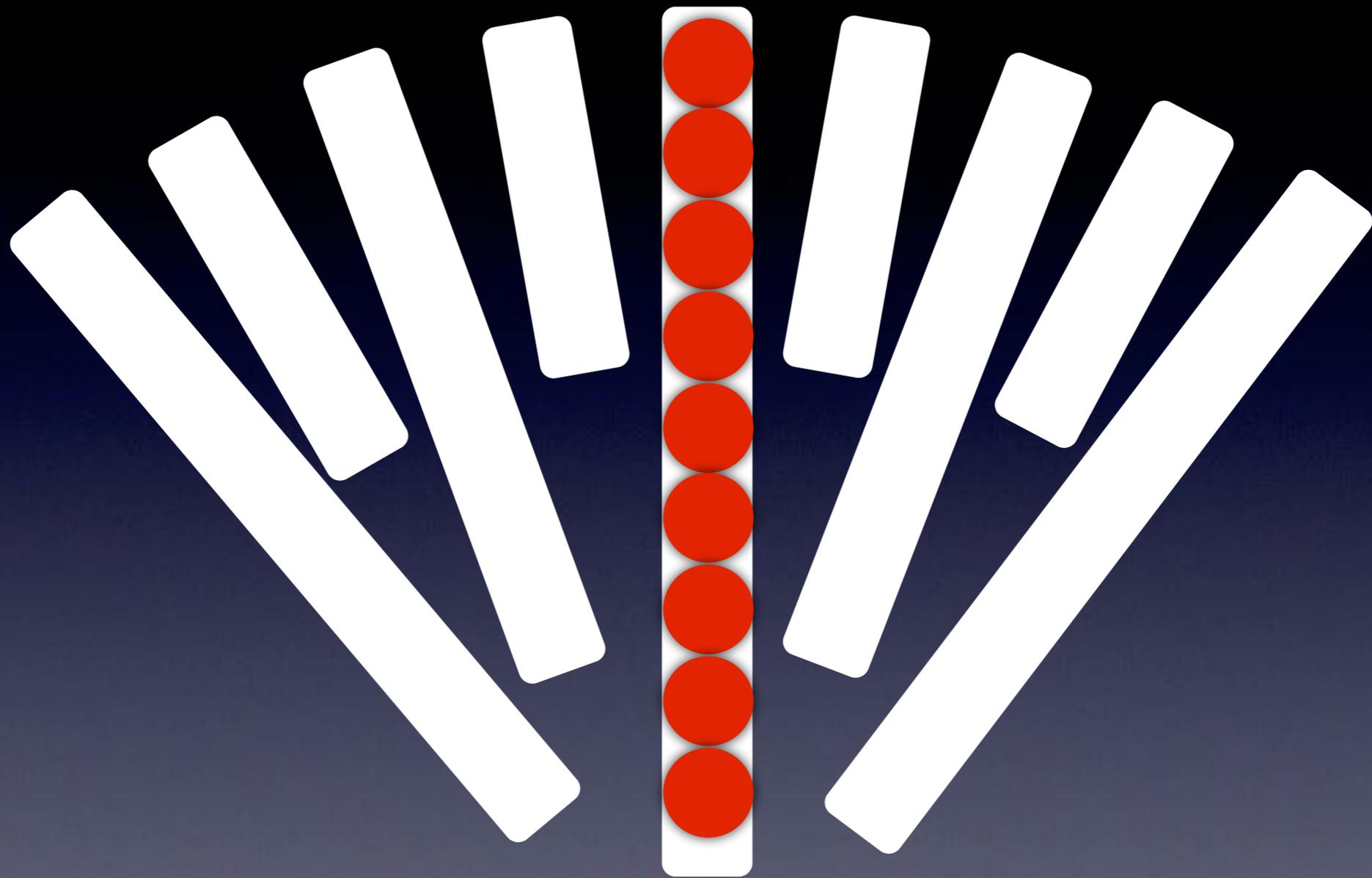

4) Repita esta misma secuencia para el resto del área. Una sola pasada por túnel es suficiente

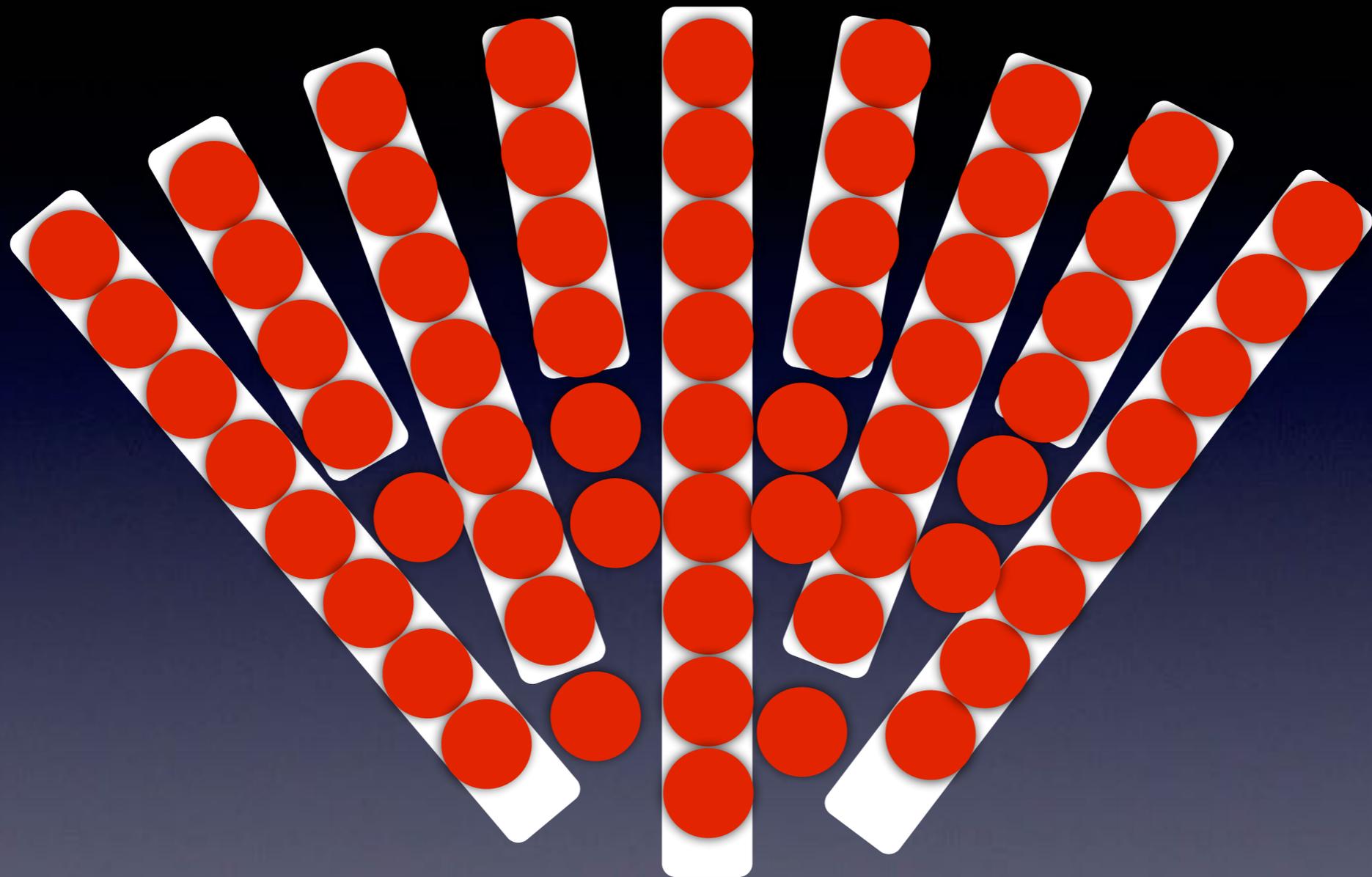

El efecto de retracción cutánea comienza inmediatamente después de la aplicación de RF. El efecto máximo se logra a los 6 meses del postoperatorio.

El efecto inicial de retracción
cutánea se puede ver durante
la cirugía. Para fines
comparativos, ya se completó
un lado con

ACEWAND™



ACEWAND™

No hay quemaduras cutáneas

Dosis precisa de RF

Ligera y portátil

No requiere mantenimiento

Muy fácil de usar

ACEWANDTM

Retracción cutánea confiable

Compatible

Técnica muy fácil de aprender

Baja costos de cirugía

Tecnología de Miniaturización

ACEWAND™ es un
aparato de alta tecnología y
debe manejarse con
delicadeza.

No use el ACEWAND™
si se encuentran dañados el
cable o la cubierta aislante

ACEWAND™

La Lipoplastía RF más segura

© 2010-2018 ACEWAND™. All rights reserved